



Беруши Calmy® (Калми)



из мягкого силикона

Назначение. Предназначены для защиты органов слуха от попадания воды, инфекций и от раздражения во время плавания в бассейне и водоемах, занятий водными видами спорта, принятия душа и т.д. Могут быть также рекомендованы для защиты органов слуха от транспортных, бытовых, производственных шумов и загрязнений (от пыли, песка и т.д.). Изготовлены из пластичного силикона. Одинаково удобны при использовании для людей с разными размерами слухового канала. Для удобства хранения и перевозки беруши упакованы в пластиковый футляр. Предназначены для многократного применения.

Защитные свойства: EN352-2:2002 (ГОСТ 12.4.275-2014 ССБТ, ГОСТ 12.4.275-2014). SNR 28 дБ (Н=32дБ, М=24дБ, L=21дБ).

Номинальный размер: 18 мм. Класс риска – 1

Применение:

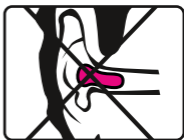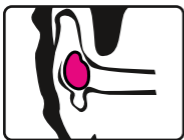

1. Вскройте упаковку. Чистыми, сухими руками сформируйте из пластичных берушей шарики.

2. Выворните шарики на слуховом канале так, чтобы образовалось воздухонепроницаемое уплотнение. Не вставляйте шарик в слуховой канал.

3. Для того, чтобы вынуть беруши, слегка надавите на область за ухом.

Футляр



Блистер



Вкладыш



EAC

Уход. Не допускается соприкосновение с красящими веществами и растворителями. По мере загрязнения беруши следует мыть вручную с использованием растворов нейтральных моющих средств при температуре воды не более +40°C, затем просушить при комнатной температуре вдали от источника тепла.

Хранение. Хранить отдельно от пищевых продуктов в недоступном для детей месте при температуре от 0°C до +25°C. **Беречь от огня!**

Меры предосторожности. Применение только по назначению согласно инструкции. Не вставляйте беруши в слуховой канал. При неправильном применении беруши могут травмировать слуховой канал. При возникновении дискомфорта во время применения беруши следует незамедлительно вынуть из ушей. Используйте только целые беруши. Не использовать во время подводных погружений на глубину более 3-х метров. Для достижения наилучших результатов не вынимайте беруши на протяжении всего авиаперелета. Не разрезать и не разрывать беруши. Не глотать. Дети младше 12 лет должны применять беруши под присмотром родителей! Не следует применять беруши при заметных загрязнениях или плохом прилипанию на слуховой канал.

Материал: Беруши изготовлены из мягкого силикона.

Срок годности: 4 года с даты изготовления

Требования по утилизации. Утилизация использованных берушей осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Производитель: ООО «Компания БИОМИР», 119034, Россия, г. Москва, переулок Лопухинский, дом 1, строение 6.

Страна происхождения: Россия

ТР ТС 019/2011

ТУ 32.99.11–002–96292881–2023