




Беруши Calmy® (Калми) из силикона

Назначение. беруши предназначены для защиты органов слуха от шумов различного характера (транспортных, бытовых, производственных), загрязнений (пыли, песка и т.д.) и применяются во время отдыха, работы, путешествий (уменьшения дискомфорта во время авиаперелетов), шумных мероприятий и т.д. Также, могут быть использованы для защиты органов слуха от попадания воды во время плавания в бассейне и занятиями водными видами спорта (кроме ныряния). Предназначены для многократного использования.


Защитные свойства: EN352-2:2002 (ГОСТ 12.4.275-2014 ССБТ, ГОСТ 12.4.275-2014). SNR 33 дБ (Н=32дБ, М=29дБ, L=28дБ).

Номинальный размер: 6-12 мм. Класс риска – 1


Применение:

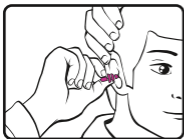

1. Свободной рукой аккуратно приподнимите ушную раковину.

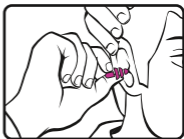

2. Аккуратно введите вкладыш в ушной канал. Покрутите, если это необходимо.

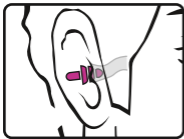

3. Корректно расположенный в ушном канале вкладыш обеспечит Вам максимальную защиту.

Футляр



PP

Блистер



PET

Вкладыш



PAP



EAC

Уход. Для очистки берушей от загрязнений рекомендуется ручная мойка при температуре воды не более +40°C с использованием нейтральных моющих средств. Очищенные от загрязнения беруши необходимо просушить при комнатной температуре вдали от источников тепла. Не допускайте соприкосновения с красящими веществами и растворителями.

Хранение. Во избежание порчи храните в оригинальном контейнере в недоступном для детей месте при температуре от 0°C до +25°C. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей.

Противопоказания. беруши противопоказано применять при отитах, воспалениях ушного канала, индивидуальной непереносимости материала.

Меры предосторожности. Применяйте только по назначению, тщательно соблюдая инструкции. Неправильное применение может вызвать травму ушного канала. В случае возникновения дискомфорта немедленно извлеките беруши из ушей. При посадке самолета рекомендуется вынуть беруши из ушей. Не использовать во время подводных погружений на глубину более 3-х метров. Не рекомендуется применять беруши при заметных загрязнениях или деформации. Если рекомендации, изложенные в данной инструкции не будут выполняться, то это повлияет на защитные свойства вкладышей.

Материал: беруши изготовлены из силикона.

Срок годности: 4 года с даты изготовления

Требования по утилизации. Утилизация использованных берушей осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Производитель: ООО «Компания БИОМИР», 119034, Россия, г. Москва, переулок Лопухинский, дом 1, строение 6.

Страна происхождения: Россия

ТР ТС 019/2011

ТУ 32.99.11-002-96292881-2023