



Беруши Calmy® (Калми)

из силикона


Назначение. Предназначены для защиты органов слуха от попадания воды, инфекций и от раздражения во время плавания в бассейне и водоемах, занятий водными видами спорта, принятия душа и т.д. Могут быть также рекомендованы для защиты органов слуха от транспортных, бытовых, производственных шумов и загрязнений (от пыли, песка и т.д.). Рельефная форма обеспечивает комфортное использование берушей.

Изготовлены из качественного силикона. Не требуют тщательного ухода. Легко моются слабым мыльным раствором. Для удобства хранения и перевозки беруши упакованы в пластиковый футляр. Предназначены для многократного применения.


Защитные свойства: EN352-2:2002 (ГОСТ 12.4.275-2014 ССБТ, ГОСТ 12.4.275-2014). SNR 32 дБ (Н=33дБ, М=31дБ, L=30дБ).

Номинальный размер: 5-14 мм. Класс риска – 1


Применение:

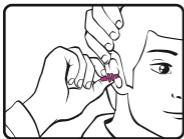

1. Свободной рукой аккуратно приподнимите ушную раковину.

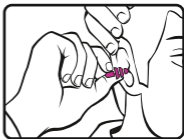

2. Аккуратно введите вкладыш в ушной канал. Покрутите, если это необходимо.

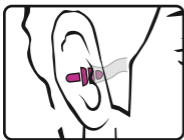

3. Корректно расположенный в ушном канале вкладыш обеспечит Вам максимальную защиту.

Футляр



PP

Блистер



PET

Вкладыш



PAP



EAC

Уход. Не допускается соприкосновение с красящими веществами и растворителями. По мере загрязнения беруши следует мыть вручную с использованием растворов нейтральных моющих средств при температуре воды не более +40°C, затем просушить при комнатной температуре вдали от источника тепла.

Хранение. Хранить отдельно от пищевых продуктов в недоступном для детей месте при температуре от 0°C до +25°C. **Беречь от огня!**

Меры предосторожности. Применение берушей противопоказано при отитах, воспалениях ушного канала, детям младше 5-ти лет. Меры предосторожности: Применять только по назначению согласно инструкции. При неправильном применении беруши могут травмировать слуховой канал. При возникновении дискомфорта во время применения следует незамедлительно вынуть беруши из ушей. При посадке самолета рекомендуется вынуть беруши из ушей. Не использовать во время подводных погружений на глубину более 3-х метров. Не разрезать и не разрывать беруши. Не глотать. Дети младше 12 лет должны применять беруши под присмотром родителей.

Материал: Беруши изготовлены из силикона.

Срок годности: 4 года с даты изготовления

Требования по утилизации. Утилизация использованных берушей осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Производитель: ООО «Компания БИОМИР», 119034, Россия, г. Москва, переулок Лопухинский, дом 1, строение 6.

Страна происхождения: Россия

ТР ТС 019/2011

ТУ 32.99.11–002–96292881–2023