



# Беруши Calmy® (Калми)


универсальные

**Назначение.** Вкладыши (беруши) противозумные универсальные многоразовые, торговая марка Calmy® (Калми) предназначены для защиты органов слуха от транспортных, бытовых, производственных шумов и загрязнений (от пыли, песка и т.д.) и применяются во время сна, работы, путешествий (уменьшение дискомфорта во время перелетов), шумных мероприятий.


**Защитные свойства:** EN352-2:2002 (ГОСТ 12.4.275-2014 ССБТ, ГОСТ 12.4.275-2014). SNR 35 дБ (Н=34дБ, М=32дБ, L=31дБ).

**Размер:** Ø 6-12 мм. Класс риска – 1

## Применение:

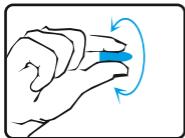

**1.** Перед использованием тщательно вымойте руки. Пальцами придайте закругленному концу вкладыша более острую конусообразную форму.

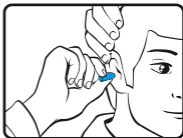

**2.** Введите вкладыш в ушной канал. Слегка оттяните ушную раковину вверх для более легкого проникновения вкладыша.



**3.** Легким надавливанием в течение 5 секунд дайте вкладышу занять удобное положение и принять форму ушного канала.

Футляр



PP

Блистер



PET

Вкладыш



PAP



EAC

**Уход.** Для чистки (возможно до 2 раз) промойте беруши слабым мыльным раствором при температуре не более +40°C не сдавливая их. После этого ополосните и дайте полностью высохнуть при комнатной температуре вдали от источников тепла. Не выжимать!

**Хранение.** Хранить в оригинальном футляре в недоступном для детей месте при температуре от 0°C до +25°C. Не допускать соприкосновения с красящими веществами и растворителями. Беречь от огня!

**Меры предосторожности.** Применять только по назначению согласно инструкции. При очень быстром изъятии берушей из ушей можно повредить барабанные перепонки. В случае возникновения дискомфорта немедленно извлеките беруши из ушей. Не используйте для защиты от воды. Перед посадкой самолета рекомендуется вынуть беруши из ушей. Не рекомендуется применять беруши при заметном загрязнении или деформации. Дети младше 12 лет должны применять беруши под присмотром родителей. Не соблюдение указаний может оказать существенное отрицательное воздействие на защитное действие беруш.

**Материал:** Беруши изготовлены из пластичного, гипоаллергенного, устойчивого к загрязнению пенополиуретана.

**Срок годности:** 4 года с даты изготовления

**Требования по утилизации.** Утилизация использованных берушей осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

**Производитель:** ООО «Компания БИОМИР», 119034, Россия, город Москва, переулок Лопухинский, дом 1, строение 6.

**Страна происхождения:** Россия

ТР ТС 019/2011

ТУ 32.99.11-001-96292881-2022